

CÁMARA TEST

REFERENCIA: OPT-116001

MARCA: OPTIKON



Descripción:

Cámara de prueba para su uso a modo de simulación de la cámara anterior del ojo humano. Es usada durante la preparación del facoemulsificador para garantizar la continuidad del circuito de irrigación/aspiración, además de poder comprobar que los parámetros seleccionados son adecuados para evitar el colapso de la cámara anterior.

Se recomienda sustituir la punta después de 100 usos, aunque no presente daño ni desgaste alguno. Independientemente del número de usos, debe de ser sustituido de inmediato a la menor presencia de daños.

La limpieza, descontaminación y esterilización deben hacerse siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante en las instrucciones del producto.

Piezas manuales de ultrasonidos compatibles:

OPT-113101, OPT-113102.

Presentación:

Caja de 2 unidades. Reutilizables y esterilizables.

Fecha de edición: 27 de agosto de 2020, Rev. 1