

CryoTreQ

Instrumento de mano desechable



DATOS TÉCNICOS

Clase del producto: FDA Clase 2 MDD Clase IIa estéril, de un solo uso	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Dos (2) años desde la fecha de fabricación.
Fabricante: VitreQ BV Países Bajos	Indicaciones: <ul style="list-style-type: none">CryoTreQ es un instrumento portátil y desechable diseñado para cirugía oftálmica. Crea una punta a temperaturas criogénicas, que puede utilizarse para crioterapia basándose en la crioblación. En este proceso, el frío extremo se usa para la criocoagulación local en el tejido para diversos fines.
Información de certificación: Certificado CE EN ISO 13485	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Mango de activación: ABS-GF, Novodur HD M203FC G3<ul style="list-style-type: none">- Acrilonitrilo- Butadieno- EstirenoColor Mevopur: Azul SB5M176206-ZNPunta: X5CrNi18-10 (1.4301; SS304)Eje: PBT Ultradur B 4520 PRO<ul style="list-style-type: none">- Polibutileno- TereftalatoBotón: ABS-GF, Novodur HD M203FC G3

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA



www.vitreq.com

	<ul style="list-style-type: none"> - Acrilonitrilo - Butadieno - Estireno <p>Color Mevopur: Azul SB5M176206-ZN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cubierta: ABS, Novodur HD M203FC <ul style="list-style-type: none"> - Acrilonitrilo - Butadieno - Estireno <p>Color Mevopur: Blanco SB0M176082-ZN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tubo de evacuación: PVC (policloruro de vinilo) <ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de: Látex / Ftalatos / Componentes de origen animal
<p>Para la esterilidad del producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esterilizado usando radiación gamma. 	<p>Material de embalaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primario: Bolsa con Tyvek separable • Secundario: Caja de cartón

Características generales:

- El contenedor de gas líquido dispone de un volumen para usar CryoTreQ en aproximadamente 15 criociclos en un mismo paciente (uso único).
- Primer y único instrumento de mano desechable para criocirugía oftalmológica, sin necesidad de conectarse a contenedores con grandes cantidades de gas desde quirófano.
- CryoTreQ suele prepararse con 6 simples pasos, de los cuales son puramente rutinarios.
- Una vez preparado el producto, es suficiente apretar el botón de activación durante 2 segundos para congelar la punta.
- Adecuado para ser usado en salas bien ventiladas que dispongan de un sistema de flujo descendente. En otros casos (para frecuencias de renovación inferiores a 20 veces/horas), el tubo de evacuación suministrado debe ser conectado a la salida de gas y a un sistema de extracción con aspiración activa.

Advertencias y precauciones: Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Instrumento de mano desechable de Vitreq CryoTreQ		
Item #	Descripción	Cantidad por caja
BVI-CT00.D01	CryoTreQ	3